

Instrucciones recolección muestra para MICROBIOMA

1. Active su Kit



Vaya a <https://www.diploidegenetics.com/copy-of-registro-de-especimenes> para activar su kit de muestra con el código asignado.

2. Tome la muestra



Después de su primer movimiento intestinal, limpie normalmente. Use el hisopo para correr ligeramente sobre el papel higiénico (aproximadamente una muestra del tamaño de un arroz).

Coloque el hisopo de algodón dentro del tubo primario y agite vigorosamente durante 20 segundos o hasta que el líquido de recolección se vuelva de color. Cerrar el tubo y agitar durante 5 segundos.

3. Envíela de vuelta por courier

